

PRODUKTBROSCHÜRE

KALIBRIERUNG & SERVICE 961-230

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH

KERN & Sohn GmbH
Prüfprotokoll für medizinische Geräte nach IEC 62353

Prüfberichtnummer: WFL-CA-2001 **Prüfdatum:** 2017-01-11

Geräteinformationen:
Hersteller: KERN & Sohn GmbH
Gerätetyp: ECG-Schrittmacher
Modellbezeichnung: MPSE 250K100PM
Geräteversion (interne Nr.):
Seriennummer: WFL123456789

Massifizierung:
Stromversorgung: ☐ Netz angeschlossen ☒ abnehmbare Anschlüsse ☒
Schutzklasse: I ☒ II ☒ III ☒ CF ☒

Prüfer:
Name: Tabas Neuburger
Firma: KERN & Sohn GmbH
Abteilung: Medizinische Produktion
Strasse und Hausnr.: Poststr. 1
PLZ: 96106
Ort, Land: Balingen, Deutschland

Auftraggeber:
Firma: Musterklinik Musterhausen
Name / Ansprechpartner: Dr. Meier
Abteilung: Medizinisches Servicezentrum
Strasse und Hausnr.: Musterweg 42
PLZ: 03445
Ort, Land: Musterhausen, Deutschland

Verwendetes Prüfmittel:
Typ: SECUTEST BASE
Hersteller: KERN & Sohn GmbH

Art der Prüfung:
Erstprüfung ☒ Wiederholungsprüfung ☐ Nach Instandsetzung/Reparatur ☐

Sicherheitsprüfung:

	Ja	Nein	Entfall (ggf. Begründung)
Die sicherheitsbezogenen Kennzeichnungen, Schilder und Aufschriften sind lesbar und vollständig.	☒	☐	
Die mechanischen Teile (z.B. Räder, Gelenke, Bremsen, usw.) sind unversehrt.	☒	☐	
Keine Beschädigung oder Verschmutzung (z.B. durch Undichtigkeiten, Netzstecker unversehrt, usw.)	☒	☐	
Der Zustand des Gerätes oder Systems sowie des Zubehörs ist in Ordnung (z.B. feste oder abnehmbare Anschlüsse).	☒	☐	
Die notwendigen Unterlagen sind verfügbar und entsprechen dem aktuellen Stand des Gerätes oder Systems.	☒	☐	
Alle von außen zugänglichen Sicherungen (mechanisch + elektrisch) stimmen mit den Angaben des Herstellers überein.	☒	☐	

Funktionsprüfung (Zielfest in Messung bei "SECUTEST Base")

	Sollwert	Messwert
Elektr. Spannung	U ₀	220,0 V
Verbrauchsstrom	I ₀	<0,1 A

	Grenzwert	Messwert
Isolationenstandsmessung bei Geräten der Schutzklasse II	R _{iso min}	≥ 7 MΩ
Geräteleakstrom Dreileitersmessung	I _{leak}	<100 µA
Geräteleakstrom Differenzmessung	I _{leak}	<100 µA

Bemerkungen:

Das Gerät hat keine Sicherheits- oder Funktionsmängel. ☒ **Bemerkungen:**

Das Gerät weist Mängel auf, welche beseitigt werden müssen. Jedoch gibt es keine Einrede gegen den Einsatz.

Das Gerät weist Mängel auf, welche beseitigt werden müssen. Es ist für den Einsatz geeignet.

Unterschrift Prüfer: Tabas Neuburger

QPC333 (rev. 1.1) STK - Formblatt G0, 14.11.2016

Sicherheitstechnische Kontrolle (STK-Protokoll)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	961-230
Modell-Reihe	961
Sortiment	Calibration & Service
Produkt Segment	Stationäre Leistungen Neu
Produktgruppe	Sonstige Leistungen Neu In Haus
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761157446
Zolltarifnummer	84239010

Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

FUNKTIONEN

Standard

