

PRODUCT BROCHURE

CALIBRATION & SERVICE 961-230

Date: 30.04.2025

ENGLISH

KERN & Sohn GmbH
Prüfprotokoll für medizinische Geräte nach IEC 62353

Prüfberichtnummer: WFL-CA-2001 **Prüfdatum:** 2017-01-11

Hersteller: KERN & Sohn GmbH **Modellbezeichnung:** MPSE 250K100PM **Datum der nächsten Prüfung:** 2018-01-11

Gerätenummer (Hersteller-Nr.): WFL123456789

Massenfälligkeit: ☒ **Stromversorgung:** ☒ **abnehmbare Anschlüsse:** ☒

Schutzklasse: II **Schaltung:** B **CF:** ☒

Prüfer: **Auftraggeber:**

Name: Tabas Neuburger Firma: Musterklinik Musterhausen

Abteilung: Medizinische Präzision Name / Ansprechpartner: Dr. Meier

Strasse und Hausnr.: Poststr. 1 Abteilung: Medizinisches Servicezentrum

PLZ: 72336 Strasse und Hausnr.: Musterweg 42

Ort, Land: Balingen, Deutschland PLZ: 72336 Ort, Land: Musterhausen, Deutschland

Verwendetes Prüfgerät:

Typ: SECUTEST BASE

Hersteller: KERN & Sohn GmbH

Art der Prüfung:

Erstprüfung ☒ Wiederholungsprüfung ☐ Nach Instandsetzung/Reparatur ☐

Sicherheitsprüfung

	Ja	Nein	Entfall (ggf. Begründung)
Die sicherheitsbezogenen Kennzeichnungen, Schilder und Aufschriften sind lesbar und vollständig.	☒	☐	
Die mechanischen Teile (z.B. Räder, Gelenke, Bremsen, usw.) sind unversehrt.	☒	☐	
Keine Beschädigung oder Verschmutzung (z.B. durch Undichtigkeiten, Netzstecker unversehrt, usw.)	☒	☐	
Der Zustand des Gerätes oder Systems sowie des Zubehörs ist in Ordnung (z.B. feste oder abnehmbare Anschlüsse).	☒	☐	
Die notwendigen Unterlagen sind verfügbar und entsprechen dem aktuellen Stand des Gerätes oder Systems.	☒	☐	
Alle von außen zugänglichen Sicherungen (mechanisch + elektrisch) stimmen mit den Angaben des Herstellers überein.	☒	☐	

Funktionsprüfung (Kernel in Messung bei "SECUTEST BASE")

	Sollwert	Messwert
Elektr. Spannung	U _N	250,0 V
Verbrauchsstrom	I _N	<0,1 A

	Grenzwert	Messwert
Isolationwiderstandsmessung bei Geräten der Schutzklasse II	R _{iso min}	≥ 7 MΩ
Geräteleakstrom Dreileitersmessung	I _{leak}	<100 µA
Geräteleakstrom Differenzmessung	I _{leak}	<100 µA

Bemerkung:

Das Gerät hat keine Sicherheits- oder Funktionsmängel. ☒ **Bemerkungen:**

Das Gerät weist Mängel auf, welche beseitigt werden müssen. Jedoch gibt es keine Einrede gegen den Einsatz.

Das Gerät weist Mängel auf, welche beseitigt werden müssen. Es ist für den Einsatz geeignet.

Unterschrift Prüfer: Tabas Neuburger

QPC333 (rev. 1.1) STK_Formblatt_Go; 14.11.2016

Safety-related monitoring (STK protocol)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Phone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scan here for more information

SPECIFICATIONS

Article codes, product groups & Status information

Model article-code	961-230
Model-Serie	961
Assortment	Calibration & Service
Product Type	Inhouse Service New
Product group	Other (initial) services inhouse
Product usage type	Accessories/DL
EAN code (Model)	4045761157446
Customs tariff number	84239010

Technical data - Packing & Shipping

Delivery time	1 d
---------------	-----

FUNCTIONS

Standard

